

## Instructies ClosureClip®

Het inbrengen van een ClosureClip® is heel eenvoudig. Toch adviseren wij de eerste plaatsing op een relatief goed gebit te doen, om even de handelingen zoals hier beschreven te ervaren. Neem aub echt even een paar minuten tijd om naast de filmpjes ook de **instructies** door te **lezen**. De ervaring heeft geleerd dat men vooral het basisprincipe soms over het hoofd ziet, wat kan leiden tot het gevoel van 'mislukte' plaatsingen.

Een **belangrijk basisprincipe** is om, na de plaatsing, altijd even goed te controleren of het verende deel **wel 'op spanning' staat en de pootjes goed zijn aangeduwd**. Controleer dit door met een nagel of pincet de ClosureClip® wat te bewegen. Blijft de ClosureClip® netjes op zijn plek, dan zit er voldoende spanning op. Let hierbij vooral op beweging bij de pootjes. Is hij makkelijk te bewegen en zit er speling bij de pootjes dan is de plaatsing niet optimaal. Er bestaat dan kans dat de kaak niet goed sluit, of na verloop van tijd weer iets open gaat staan. Dit kan vooral voorkomen bij mensen met **grote ruimtes tussen de tanden** of met **kleine tanden**. Mocht dit het geval zijn, dan is het zaak om de ClosureClip® even te verwijderen en opnieuw te plaatsen over één of meerdere extra tanden, zoals te zien is in het 2e filmpje. Aangezien de plaatsing niet optimaal was, zal de ClosureClip® zich eenvoudig met een pincet laten verwijderen door aan een van beide pootjes te trekken. Na meer ervaring zal dit een inschatting vooraf worden.

De ClosureClip® is volledig symmetrisch, behoudens de lengte van het uiteinde van de pootjes en kan op elke gewenste manier geplaatst worden, zowel bij kiezen als tanden. Doorgaans is aan te raden **eerst het lange pootje** aan te haken voor een eenvoudigere plaatsing, dit kan dus zowel bij boven- als ondertanden zijn. Na het positioneren van beide pootjes in de juiste tussenruimtes is het zaak om vervolgens een beetje **wiebelend / masserend het verende deel stevig aan te duwen**, waardoor de pootjes één voor één doorgeduwd worden tussen de tanden. Hierbij zal het verend deel wat uitrekken, wat bij de werking hoort. **Erg mag flink wat kracht gegeven worden waar nodig, dit kan geen kwaad**. Let er bij het plaatsen goed op dat er een soort van **'klik' moment** te voelen is bij het aanduwen van de pootjes. Het is verstandig om nog even beide pootjes extra aan te duwen en te inspecteren of ze volledig diep tussen de tanden zitten. Zeker bij de eerste plaatsingen is het aan te raden even met een dun pincetje rustig aan beide pootjes te trekken om te voelen dat ze echt goed vastgeklikt zitten. **Let op dat de uiteinden van de pootjes scherp kunnen zijn.**

Het eerste filmpje laat een standaardplaatsing zien in de tussenruimtes recht tegenover elkaar. Deze plaatsing gaat erg eenvoudig. **Achter de boven hoektand is een mooie standaardplek** om goed uit het eventuele zicht te blijven. Tijdens het aanduwen is er wellicht te voelen dat het verende deel wat uitrekt, wat volkomen normaal is. **De ClosureClip® kan behoorlijk wat hebben en zal behoudens wat eventuele vervorming nooit echt stuk gaan.**

Mocht er na een standaardplaatsing toch nog wat ongewenste speling bestaan (bv bij zeer korte tanden of ruime openingen tussen te tanden) kan de **ClosureClip® makkelijk verwijderd worden om opnieuw te plaatsen**. Trek met een nagel of pincet aan een van beide pootjes waardoor hij los zal komen. Hierna kan de ClosureClip® opnieuw geplaatst worden, maar dan met een van de pootjes een tussenruimte verder en dus schuin, zodat er meer spanning op het verend deel komt en hij beter vast blijft zitten. Dit toont het 2e filmpje, wat ook laat zien dat de **ClosureClip® wat oprekt tijdens het**

**plaatsen, wat volkomen normaal is.** Er mag ook best wat kracht gezet worden om het 2e pootje erin te masseren. Dit gaat het makkelijkst door vanaf het reeds ingeduwde pootje, het verende deel richting het nog te plaatsten pootje te masseren.

Als er om welke reden dan ook een **grotere afstand** overbrugd moeten worden, zal zoals in het laatste filmpje te zien is de **ClosureClip® flink moeten oprekken**. Het is dan handiger om de ClosureClip® **vóór de plaatsing al wat met de hand op te rekken** om het inbrengen te vereenvoudigen. Trek hiervoor beide korte bochtjes van het verende deel wat uit elkaar.